

PROFILO®

טיפול פורץ דרך באיכות רקמות העור



Alma™
For You. For Life.

IBSA
Caring Innovation



חברת ALMA ישראל הינה הנציגה הבלעדית של חברת IBSA בישראל. החברה מייצגת באופן בלעדי מגוון רחב של חברות בינלאומיות מובילות בתחום הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת.

בין מותגי הליבה אותם משווקת החברה, טכנולוגיות מובילות כגון: CLEAR LIFT ,ACCENT PRIME ,SOPRANO SHR ,FEMILIFT ,LIPO ועוד. LIFE-1470 ,Z-LIPO.

מגוון הטכנולוגיות המשווקות ע"י ALMA ישראל נמצאות בשימוש בקליניקות והמרפאות המובילות בישראל, על ידי מיטב הרופאים המומחים בארץ: כירורגים פלסטיים, רופאי עור, רופאים אסתטיקנים וגניקולוגים, מכוני קוסמטיקה, מועדוני כושר וספא.



Caring Innovation

סדרת PROFHILO פותחה במעבדות חברת התרופות השווייצרית IBSA, הנחשבת לאחת מהמובילות באירופה במחקר ופיתוח של תרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות בתחום רפואת העור.

אחד התחומים המובילים של חברת IBSA, הינו פיתוח פורמולות חדשניות המכילות חומצות היאלורוניות, לשימוש ברפואת עור בפרט ובמגוון תחומי יישום נוספים ברפואה בכלל.

קבוצת IBSA, אשר נוסדה בשנת 1945, כוללת מספר רב של מעבדות, הפועלות במגוון ענפי ייצור ופיתוח רפואיים ועומדת בתקנים המחמירים ביותר.

IBSA חרטה על דגלה להוביל בתחום פיתוח הטכנולוגיות הרפואיות פורצות הדרך, תוך שליטה מלאה במעגל הייצור ואחריות על כל שלבי המחקר והפיתוח.

PROFHILLO®

טיפול ביסודות העור שלך

מקור הבעיה

את מביטה במראה מדי יום ופתאום מגלה עוד קמט סביב העיניים, קמט חדש סביב הפה ובאופן כללי, עור הפנים והצוואר כבר לא מתוח כמו פעם, הבעת הפנים שלך נראית בוגרת ועייפה, הבעיה טמונה בכך שיסודות העור שלך פגומים.

הצורך

כמה פעמים שאלת את הרופא האם קיים פתרון להשבת המראה הצעיר והרענן לפניך, כזה שתוצאותיו טבעיות ואינן דורשות התערבות כירורגית?

הפתרון

היום לראשונה, יכול הרופא שלך להציע פתרון טבעי לטיפול באיכות רקמות העור. הטיפול מהווה פריצת דרך מהפכנית לשיקום יסודות העור ומומלץ לכל אישה מעל גיל 30. התהליך מגביר שחזור טבעי בכל שכבות העור ומעודד ייצור קולגן ואלסטין, לשיקום רקמת העור ושיפור איכותה.

3 היסודות לירידה באיכות רקמות העור

1 | ירידה ברמות החומצה ההיאלורונית, החיונית לשמירה על לחות גבוהה בעור, לגמישותו ולמראהו הזוהר של עור הפנים.

2 | הפחתה בייצור סיבי קולגן ואלסטין, האחראיים למיצוק וגמישות רקמת העור.

3 | אבדן חיות רקמת השומן, הגורם לירידה בנפח הפנים, לקמטים וקמטוטים.

PROFHILO

חומצה היאלורונית טהורה, מיוצבת ומוגנת פטנט, המובילה עידן חדש בטיפול להצרת העור.

השפעתו הייחודית של PROFHILO על רקמת העור משקפת פעילות של ממריץ טבעי לתהליכי התחדשות העור המתקיימת בשלושה מימדים.



PROFHILO®

3D

BIO REMODELING

מעורר את תאי הפיברובלסטים ובכך מגביר את ייצור סיבי הקולגן והאלסטין. | 1D

משפעל את תאי הקרטינוציטים להגברת ייצור סיבי הקולגן והאלסטין. | 2D

משמר ומעודד את חיות תאי האדיפוציטים המשפיעים על איכות רקמת השומן. | 3D



כיצד זה עובד?

המבנה ההיברידי החדשני של PROFHILO, משלב חומצה היאלורונית טהורה במשקל מולקולרי גבוה ונמוך, ללא שימוש בחומרים כימיים סינתטיים המצויים בחומרי מילוי נפוצים מבוססי חומצה היאלורונית (CROSS LINKER). המבנה ההיברידי המיוצב והתכונות המולקולריות הייחודיות של PROFHILO, מעוררים תהליכים טבעיים בכל שכבות העור להגברת ייצור קולגן, אלסטין, שימור ועידוד חיות תאי השומן ובתוך כך משקמים את רקמת העור ומשפרים את איכותה.

איזורי הטיפול:

- פנים
- כפות ידיים
- מצח
- צוואר
- סביב הפה
- לפני ואחרי מתיחת
- מחשוף
- סביב העיניים
- פנים ופילינג

התוצאה:

- מראה טבעי
- מוצק ומתוח יותר
- עור בריא יותר
- רענן, קורן וזוהר יותר
- עור גמיש ועבה יותר
- שיפור בקמטים ובקמטוטים

PROFHILO®

טיפול פורץ דרך באיכות רקמות העור

טכנולוגיה חדשנית מוגנת פטנט

טכנולוגיית הפיתוח החדשנית NAHYCO® מוגנת הפטנט, כוללת תהליכי ייצור תרמיים, המובילים לקבלת מולקולה המכילה חומצה היאלורונית טהור, המיוצבת ללא כל ריאגנט מקשר ומעודדת חידוש תהליכים ברקמת העור.



ללא לידוקאין וללא BDDE

חומר הגלם של PROFHILO מיוצר בהנדסה גנטית בצורה הנקייה ביותר, המאפשרת פיזור וספיגה אחידים ברקמות העור, עובדה התורמת לדרגת בטיחות גבוהה ביותר ומקטינה לעין שיעור סיכוי לתופעות לוואי.

תהליך הפיתוח, הופך את PROFHILO לחומצה היאלורונית טהורה, נטולת חומרים מקשרים כימיים כגון BDDE, לידוקאין ואחרים, יתרון המספק רמת בטיחות מקסימאלית.



64mg


ריכוז החומר הפעיל ב - PROFHILO הוא הגבוה ביותר מבין כלל החומרים מבוססי החומצה ההיאלורונית.



באישור הרשות האירופאית ומשרד הבריאות הישראלי

חומצה היאלורונית PROFHILO פותחה תחת תהליכי פיתוח וייצור קפדניים ביותר והמוצר מאושר על ידי הרשות האירופאית CE ומשרד הבריאות הישראלי.



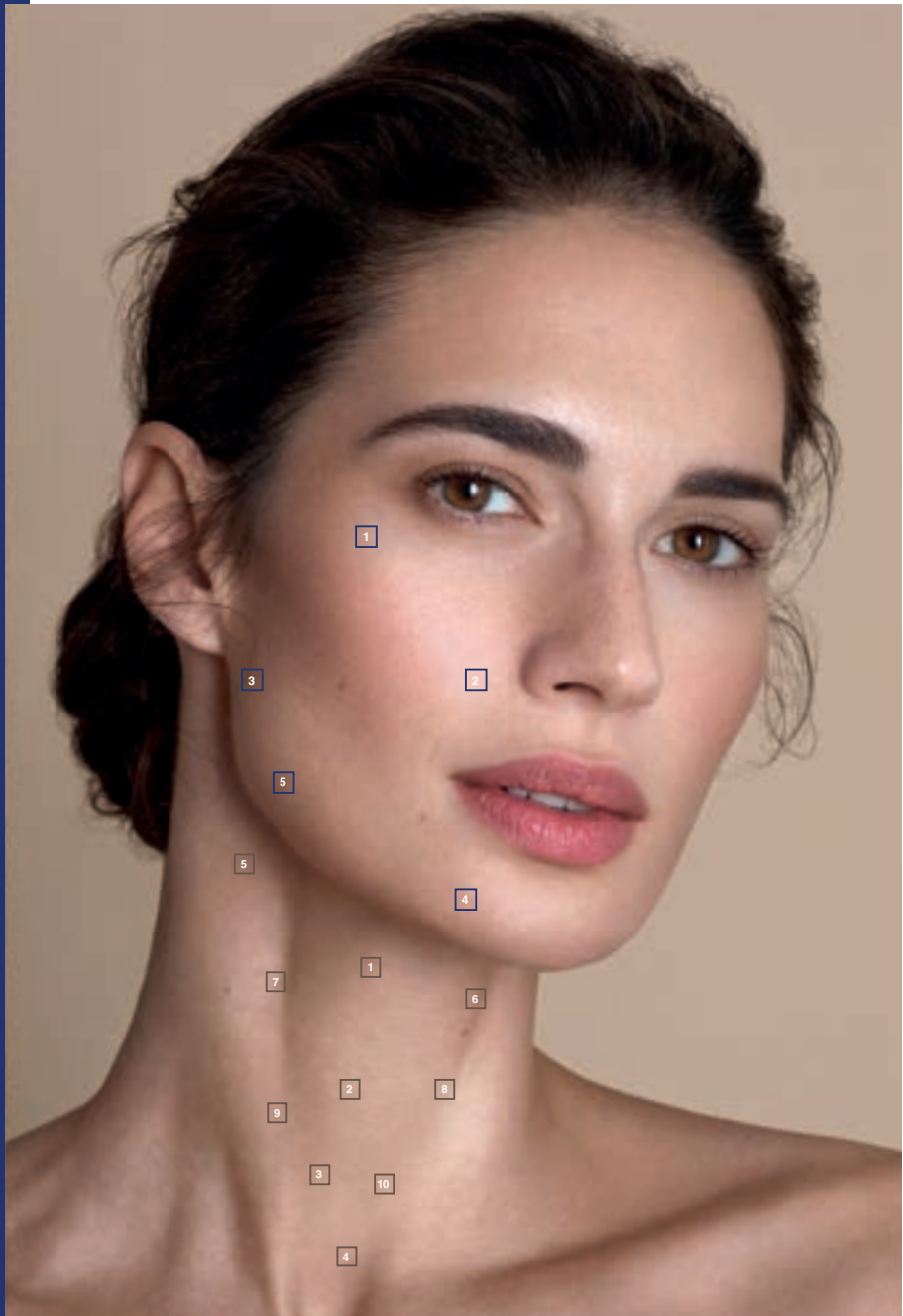

PROFHILO®

שיטת ההזרקה לפנים ולצוואר

טיפול 5 הנקודות

המולקולה ההיברידיית החדשנית של PROFHILO מאפשרת פיזור וספיגה אחידים ברקמות העור. תכונות ייחודיות אלה, הובילו את חברת IBSA לפתח מודל הזרקה חדשני ולהסתפק בפחות נקודות הזרקה ובפחות כאב, בהליך קצר שאורך 5 דקות בלבד.


BAP-FACE

הטיפול מתבצע בשיטת (B.A.P BIO AESTHETIC POINTS) הכוללת הזרקה ל-5 נקודות בלבד, בכל אחד מצדי הפנים. הבחירה בנקודות אלה, תורמת ליעילות גבוהה של הטיפול, היות ונקודות אלו בפנים נחשבות ל"פתוחות", עם מיעוט כלי דם גדולים והסתעפויות עצביות. שיטת הזרקה זו תורמת לכך ש-PROFHILO מפעפע במהירות ונספג היטב ברקמות.

BAP-NECK - טיפול 10 הנקודות

הטיפול לאיכות עור הצוואר הכולל הזרקה ל-10 נקודות אנטומיות לקבלת פיזור אחיד, פעפוע של PROFHILO לתוך רקמות העור.

הזרקת PROFHILO בשיטת B.A.P תעניק לפניך ולצווארך מרקם אחיד וחלק, מתוח באופן טבעי עם הברק והזהר החיוניים למראה צעיר ורענן.

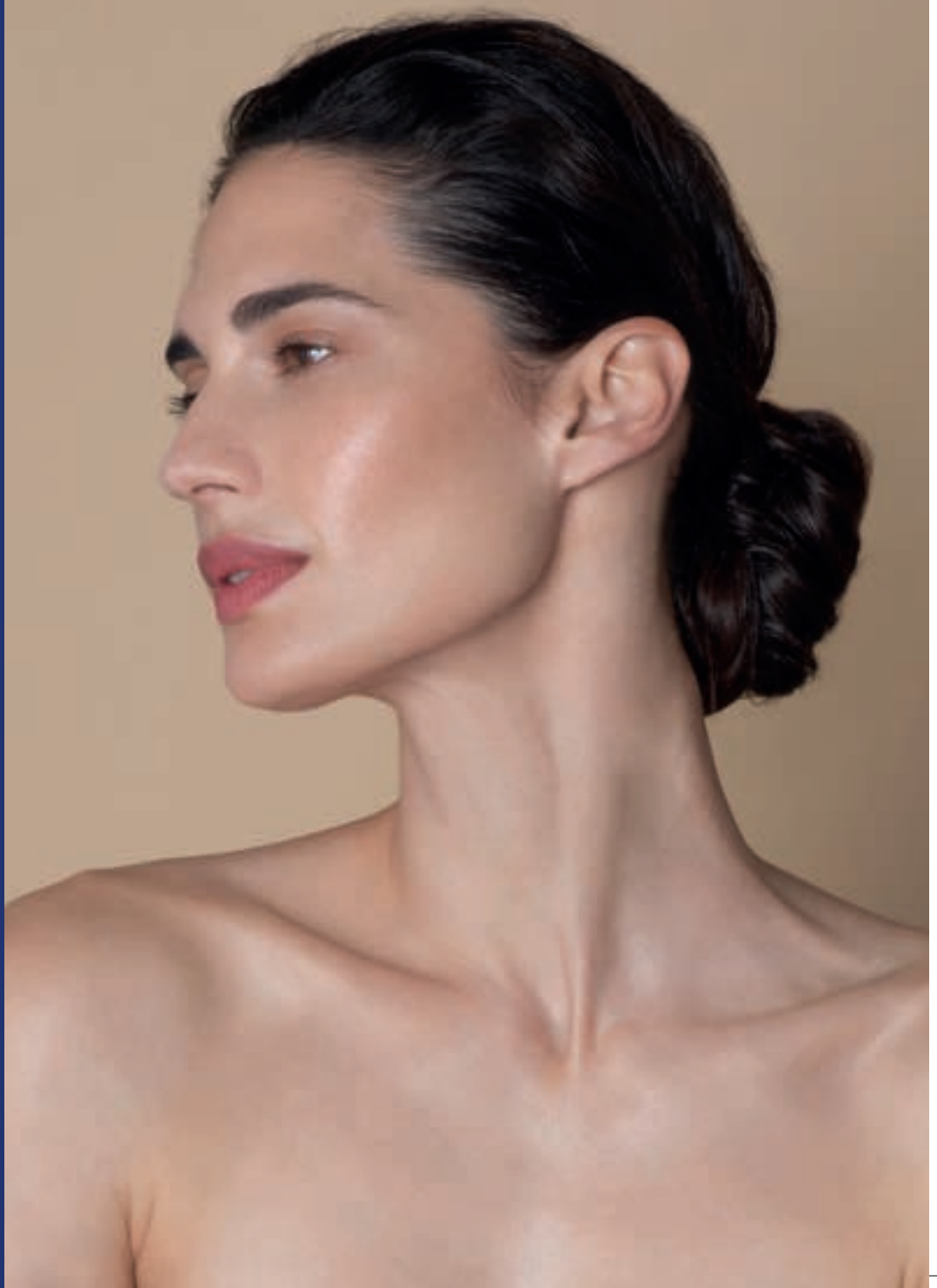

PROFHILO[®]
PLUS

PROFHILO[®]



VISCODERM[®]
hydrobooster

הפתרון השלם לאיכות רקמות העור


PROFHILO[®] PLUS

PROFHILO PLUS פותח על מנת לתת פתרון שלם ומלא לאיכות העור, הודות לאפקט סינרגיסטי בין שני מוצרים הפועלים בשני מנגנונים שונים על שכבות העור השונות. הטיפול כולל הזרקה שטחית והזרקה עמוקה למגוון שכבות העור ובכך נותן מענה מלא למראה מרקם ולאיכות הרקמה.

מנגנון אחד בפעולה מיידית והשני בפעולה הנמשכת לאורך זמן. VISCODERM HYDROBOOSTER - מטפל במרקם העור ונותן תוצאה מיידית של אפקט מתיחה לקמטי הבעה.



PROFHILO®

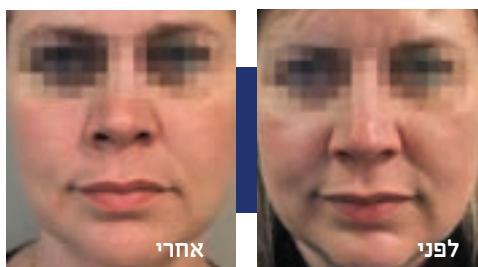



כל הטכנולוגיות הרפואיות והמכשור המשוקק על ידי ALMA ישראל
מאושרים על ידי משרד הבריאות הישראלי והחברה פועלת תחת תו תקן ISO 9001

פרטים בטלפון: 03-6320675 | www.alma-israel.co.il



חפשו: alma-israel